

근관 치료용 수동용 파일리머

모델명 : GATE DRILLS,

PEESO REAMERS

품목신고번호 : 제신 21-1099호

사용 목적

전동 핸드피스에 끼워서 근관 내의 신경을 제거하거나 근관을 확대하는 기구

사용 방법

1. 사용 전 준비사항
비멸균 제품으로 사용 전에 반드시 멸균을 실시하여야 한다.
[권장 멸균방법] 오토클레이브 134℃, 18분 이상 멸균 후 건조한다.
2. 사용방법
1) 핸드피스에 장착 후 핸드피스의 적정회전수는 250~1000rpm 을 유지한다.
2) 근관을 형성할 때, 먼저 작은 Size부터 조금씩 확대 형성한다.
3. 사용 후 보관 및 관리방법
1) 고온 다습한 환경, 직사광선 피하고 실온에 보관한다.
2) 사용 후 이물질을 물로 제거한 후 Enzymatic detergent로 초음파 세척을 실시한다.
3) 세척된 제품은 건조(열풍건조 : 90℃, 20분) 한 후 청결하게 보관한다.

사용시 주의사항

1. 경 고
본 제품은 니켈 또는 크롬이 포함되어 있으며, 금속성 알레르기 또는 민감성을 가진 환자에게는 사용하지 마십시오.
2. 일반적 주의
1) 치과전문가에 의해 사용되어야 하며, 사용방법, 사용상의 주의사항을 준수하여야 한다.
2) 치과용으로만 사용하여야 한다.
3. 사용 시 주의사항
1) 비멸균으로, 반드시 사용 전에 멸균을 하도록 한다.
2) 핸드피스 적정회전수는 250~1000rpm 이다.

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원 080-080-4183

- 제조의뢰자 : ㈜다디아덴트
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 16
전화 : 043-266-2315
팩스 : 043-262-8658
이메일 : diadent@diadent.co.kr
홈페이지 : WWW.DIADENT.CO.KR

- 제조자 :
Shenzhen Superline Technology Co., Ltd.
Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan community,
Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China